

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Acticoat 7 IFU (Russian)
CODE:	#66000796
THIS BSC:	xxxxxxxx / 46527
PREV BSC:	
DATE:	11.12.2013
REVISION:	02

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1533		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	JW



# АСТИСОАТ<sup>◊</sup> 7

с нанокристаллами SILCRYST<sup>◊</sup>

Антимикробная повязка с серебром

**СТЕРИЛЬНО R** Радиационный метод стерилизации. Не использовать повязку из открытой или поврежденной упаковки. Предназначено только для однократного использования. Повторная стерилизация не допускается. Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C/77°F. Избегать воздействия света и температуры выше 50°C/120°F.

**Описание**  
Антимикробная защитная повязка АСТИСОАТ 7 состоит из пяти слоев: двух внутренних абсорбирующих вискозно-полиэфирных слоев, расположенных поочередно между тремя слоями из полиэтиленовой непроницаемой сетки с нанокристаллами серебра. АСТИСОАТ 7 – это абсорбирующая раневая повязка, которая помогает регулировать влажную среду на поверхности раны. Повязка имеет атравматический нижний слой, который не прилипает к раневой поверхности, что позволяет свести к минимуму возможность травматических повреждений при смене повязки. Нанокристаллы серебра обеспечивают эффективную защиту от контаминации патогенными микроорганизмами из окружающей среды, способствуя быстрейшему заживлению раны. Нанокристаллическое серебро защищает рану и от микробов, присутствующих в ране, снижая риск ее вторичного инфицирования. АСТИСОАТ 7 сохраняет антимикробные свойства в течение 7 суток.

**Показания к применению**  
АСТИСОАТ 7 рекомендуется использовать в качестве абсорбирующей антимикробной повязки при лечении поверхностных и глубоких ран, включая пролежни, венозные трофические язвы, диабетические язвы, ожоги, реципиентные участки при пересадке кожи. АСТИСОАТ 7 может также использоваться для инфицированных ран. При использовании в инфицированных ранах необходимо определение возбудителя инфекции и лечение согласно принятому клиническому протоколу.

**Противопоказания**

- Не применять у пациентов с повышенной чувствительностью к серебру.
- Не применять у пациентов, во время проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ).
- Пред проведением радиационной терапии повязку следует удалить. Новую повязку можно накладывать в плановом порядке.

**Меры предосторожности**

- Не увлажнять для использования на местах введения катетера.
- Только для наружного применения.

- Повязка АСТИСОАТ 7 не совместима с препаратами на масляной основе, такими как вазелин.
- Избегать контакта повязки с электродами или токопроводящими гелями во время электронных измерений, например, при ЭЭГ и ЭКГ.
- Не использовать при изменении цвета повязки.
- Поступали сведения о возникновении временной боли при использовании АСТИСОАТ 7. Вероятность возникновения болевых симптомов можно минимизировать, следуя инструкции по применению. Если боль была длительной, снимите повязку и прекратите ее использование.
- АСТИСОАТ 7 следует использовать для лечения недоношенных детей (менее 37 недель беременности) только в том случае, когда польза от применения продукта превышает потенциальный риск. Данные клинических исследований для этой группы детей отсутствуют, есть лишь ограниченные сведения по его использованию для доношенных новорожденных.

**Инструкция по применению:**

- Извлеките повязку АСТИСОАТ 7 из упаковки, сохраняя стерильность.
- Смочите поверхность повязки питьевой водой (НЕ используйте физиологический раствор). Удалите излишки воды до аппликации, положив повязку на стерильную поверхность на 2 минуты.
- При необходимости вырежьте повязку по форме раны.
- Наложите повязку на поверхность раны.
- Зафиксируйте повязку АСТИСОАТ 7 вторичной повязкой, которая будет поддерживать влажную раневую среду. При большом количестве экссудата в ране, используйте абсорбирующую вторичную повязку, при этом пленочные покрытия не рекомендуются.
- Сохраняйте повязку влажной, но не настолько, чтобы вызвать мацерацию кожи.
- Меняйте повязку в зависимости от количества экссудата и состояния раны. Повязку рекомендуется менять не реже 1 раза в 7 суток.
- Используйте повязку АСТИСОАТ 7 при компрессионной терапии, регулярно проверяйте всю систему повязок и меняйте только в случае нарушения целостности повязки. В первую неделю может понадобиться дополнительная полупрозрачная абсорбирующая повязка при обильном экссудате.
- При высыхании или прилипании повязки к ране, смочите или промокните повязку, чтобы легче её снять и не травмировать заживающую рану.

**Примечание:** АСТИСОАТ может вызвать транзитное изменение цвета окружающей кожи.

Ассортимент	Размер	Штук в упаковке
Код		
66000809	5см x 5см / 2" x 2"	5
66000796	10см x 12,5 см / 4" x 5"	5
66000797	15см x 15 см / 6" x 6"	5
	"- дюймы	

**Производитель**  
Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN, Англия  
Товарные знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 12/2013  
Номера патентов: US 5681575, 5753251, 5770255, 5837275 www.smith-nephew.com  
46527

