

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Carbonet IFU (Russian)
CODE:	
THIS BSC:	xxxxxxxx / 55070
PREV BSC:	
DATE:	22/12/2014
REVISION:	03


STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1904		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	HB

(RU)

 smith&nephew

# CARBONET<sup>◇</sup>

Впитывающая запах повязка

**СТЕРИЛЬНО R**  Для одноразового использования. Стерилизовано гамма-излучением. Не используйте, если упаковка открыта или повреждена. Хранить в сухом месте (<25 °C).

**Описание**  
CARBONET — это многослойный абсорбент запаха, состоящий из низкоадгезивного слоя, контактирующего с раной, абсорбирующего слоя, слоя активированного угля и защитного слоя.

**Показания**  
CARBONET назначается при экссудирующих, инфицированных и зловонных ранах, таких как:

- трофические язвы на ногах;
- фунгозные карциномы;
- каловые свищи;
- инфицированные хирургические раны.

**Противопоказания и меры предосторожности**  
Нет.

## Применение

1. При необходимости очистите дно раны в соответствии с клиническим протоколом
2. Очистите рану стерильным физиологическим раствором или антисептическими растворами.
3. Наложите блестящей стороной непосредственно на рану.
4. Зафиксируйте с помощью фиксирующего бинта или пластыря (напр., OPSITE<sup>®</sup> Flexifix).

## Частота смены

Повязки CARBONET могут оставаться на месте 2–3 дня в зависимости от объема экссудата.

## Снятие повязки

Для снятия повязки CARBONET удалите фиксирующий бинт или пластырь, а затем удалите повязку с раны.

## Доступность продукта

Код	Размер	Доступность
7064	10 см x 10 см	10
7065	10 см x 20 см	10
66007066	10 см x 10 см	12
66007067	10 см x 20 см	12

## Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessel Road,  
Hull HU3 2BN, England  
\*Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew  
Дата выпуска 12/2014 www.smith-nephew.com

55070

  
0086