

| SMITH & NEPHEW RECORD | |
|-----------------------|-------------------------|
| ITEM: | Cuticerin IFU (Russian) |
| CODE: | |
| THIS BSC: | xxxxxxxx / 55049 |
| PREV BSC: | |
| DATE: | 22/12/2014 |
| REVISION: | 03 |

| STRAWBERRY RECORD | | | |
|---------------------------|------------|---------|----|
| JOB NO: | 1906 | | |
| DIMS: | 90 x 210mm | | |
| COLOURS | ■ Black | | |
| Match to coated stock PMS | | | |
| ARTWORK | MP | CHECKED | HB |

(RU)

 smith&nephew

CUTICERIN[®]

Повязка с низкой адгезивной способностью

СТЕРИЛЬНО R 

Стерилизовано гамма-излучением. Не использовать, если упаковка открыта или повреждена. Только для одноразового использования. Не стерилизовать повторно. Хранить в сухом месте (<25 °C/77 °F).

Описание

CUTICERIN изготовлена из гладкой ацетатной ткани с определенным размером ячеек и гидрофобным покрытием на основе вазелина, парафина и ланолина (EUCERITE ...).

Показания

В качестве контактного слоя при поверхностных экссудирующих ран, таких как:

- ожоги;
- радиационные повреждения;
- ссадины;
- донорские участки расщепленных лоскутов кожи.

Противопоказания

Не используйте для пациентов с известной аллергией на один из следующих компонентов:

- вазелин;
- парафин;
- ланолин.

Меры предосторожности

Нет.

Характеристики

- Низкая адгезия по отношению к дну раны.
- Сводит к минимуму боль при смене повязки.
- Снижает риск врастания грануляционной ткани в повязку.
- Проницаемая для воздуха и экссудата.

Инструкция по применению

1. Снимите защитный слой.
2. Возьмите повязку пинцетом или рукой в перчатке.
3. Ровно наложите повязку на рану.
4. Используйте абсорбирующий материал для удаления излишнего экссудата, если необходимо.
5. Фиксация повязки бинтом или клеящим материалом.

Доступность продукта

| Код | Размер | Доступность |
|----------|--------------------------------------|----------------------|
| 66045560 | 7,5 см x 7,5 см / 3 дюйма x 3 дюйма | 50 шт. в коробке |
| 66045561 | 7,5 см x 20 см / 3 дюйма x 8 дюймов | 50 шт. в коробке |
| 66045562 | 7,5 см x 7,5 см / 3 дюйма x 3 дюйма | 10 шт. в коробке |
| 66045563 | 7,5 см x 20 см / 3 дюйма x 8 дюймов | 10 шт. в коробке |
| 66045503 | 7,5 см x 20 см / 3 дюйма x 8 дюймов | 25 x 3 шт. в коробке |
| 66045564 | 10 см x 10 см / 4 дюйма x 4 дюйма | 10 шт. в коробке |
| 66045502 | 20 см x 40 см / 8 дюймов x 16 дюймов | 25 шт. в коробке |

Производитель

Smith & Nephew Medical Ltd,
101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, England
®Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew
Дата выпуска 12/2014 www.smith-nephew.com

55049


0086