

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Ichthopaste IFU (Russian)
CODE:	N/A
THIS BSC:	xxxxxxx / 55843
PREV BSC:	N/A
DATE:	10/04/2015
REVISION:	00

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	2005		
DIMS:	210 x 42mm		
COLOURS	<div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	HB



## ИХТНОПАСТЕ<sup>◇</sup>

### Бинт с цинковой пастой и ихтиолом ВР



Для однократного использования.  
Хранить в сухом месте (<25 °C/77 °F).  
Не используйте, если упаковка открыта или повреждена.

#### Описание

Бинт ИХТНОПАСТЕ изготовлен из прозрачной ткани, пропитан пастой, содержащей 6,32% оксида цинка ВР и 2% ихтиола ВР и намотан на пластмассовую катушку. В состав пасты также входят дистиллированная вода ВР, глицерин ВР, глютин ВР, воск нейонный эмульгированный ВР, феноксиэтанол ВР. Бинт замотан в обертку, запечатан в полиэтиленовый пакет и упакован в картонную коробку.

#### Механизм действия

ИХТНОПАСТЕ предназначен для наружного применения. Он создает влажную заживляющую среду для язв на ногах, уменьшает раздражение, а также успокаивает и защищает кожу вокруг. Бинт не высыхает в процессе использования.

#### Показания

Бинт ИХТНОПАСТЕ помогает в лечении трофических язв на ногах. При лечении венозной недостаточности бинт с пропиткой применять под компрессионный бандаж. ИХТНОПАСТЕ также подходит для лечения хронической экземы / дерматита, если врач рекомендует окклюзию.

#### Противопоказания

Не использовать бинт, если любой из компонентов вызывает раздражение или аллергию.

#### Меры предосторожности

Если наблюдается венозная недостаточность, следует применять ИХТНОПАСТЕ под компрессионный бандаж разной степени плотности, предварительно осмотрев пациента и исключив артериальную болезнь. Для этой цели рекомендуется провести ультразвуковое доплеровское исследование. Не использовать компрессионный бандаж, если у пациента диагностирована артериальная болезнь (ABPI <0,8). Не рекомендуется использовать, если у пациента с сахарным диабетом диагностирована прогрессирующая болезнь малых сосудов. Если присутствует, но не выявлен, пониженный приток артериальной крови, применение бинта может привести к некрозу вследствие сдавливания, ампутации или смерти. С возрастом риск артериальной и венозной болезни становится выше. Кожа пациентов с язвами на ногах крайне чувствительна к наружным препаратам, в том числе антисептикам. Следует заподозрить аллергические реакции у пациентов с нарушением окружающего кожного покрова. Таких пациентов необходимо направить к специалисту для определения диагноза и взятия кожной аллергической пробы. Одной из функций давящей повязки является увеличение всасывания. Поэтому следует быть осторожным при нанесении наружных препаратов (стероидов, анестетиков или ретиноидов), так как бандаж может значительно повысить их всасывание. Это может сократить продолжительность действия анестетика или увеличить риск аллергии на эти препараты. Только для наружного применения. ИХТНОПАСТЕ предназначен для однократного применения. В случае использования

55843

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Ichthopaste IFU (Russian)
CODE:	N/A
THIS BSC:	xxxxxxx / 55843
PREV BSC:	N/A
DATE:	10/04/2015
REVISION:	00

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	2005		
DIMS:	210 x 42mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	HB



## ИХТИОПАСТЕ<sup>®</sup>

### Бинт с цинковой пастой и ИХТИОЛОМ ВР

более чем для одного пациента может возникнуть перекрестное заражение или инфекция. Не хранить неиспользованный материал для последующего применения во вскрытой упаковке.

#### Инструкция по применению


Продукт готов к применению после извлечения из герметичной упаковки и обертки. Есть два способа применения повязки:

- Начать у основания пальцев и по спирали намотать бинт вокруг ступни, пятки и ноги почти до колена. После нанесения повязку следует расправить и разгладить вокруг ноги.
- Начать у основания пальцев и намотать бинт вокруг ступни и пятки, а затем, при намотке от лодыжки, с каждым витком отгибать складку на уже намотанный бинт на передней стороне ноги. Намотать бинт таким способом почти до колена. Затем можно наложить компрессионный бандаж. Чтобы не испачкать одежду, намотайте поверх ИХТИОПАСТЕ повязку из перевязочного материала.

**Рекомендованная продолжительность использования взрослыми и детьми**  
Менять повязку по мере необходимости, носить до 7 дней.

#### Дополнительная информация

Ихтиол сам по себе, независимо от окклюзионной природы продукта, может увеличить всасывание через кожу кортикостероидов, гепарина и хлорамфеникола. Ихтиол также усиливает действие окситетрацилина и противодействует ампицилину, если эти компоненты присутствуют в различных мазевых основах.

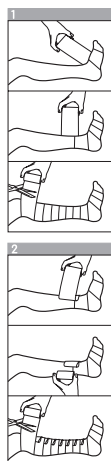

#### Доступность продукта

Код	Размер	Упаковка
4959	7,5 см x 6 м	1 шт. в коробке

**Производитель**  
Smith & Nephew  
Medical Limited,  
101 Hesse Road, Hull  
HU3 2BN, England.



\*Торговый знак Smith & Nephew  
©Smith & Nephew Дата выдачи 04/2015  
Сделано в Китае www.smith-nephew.com