

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Intrasite Conformable IFU (Russian)
CODE:	
THIS BSC:	xxxxxxxx / 55067
PREV BSC:	
DATE:	22/12/2014
REVISION:	03



STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1910		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	HB

(RU)

smith&nephew

# INTRASITE<sup>®</sup> CONFORMABLE

Гидрогелевая повязка для ран

**СТЕРИЛЬНО**   Для одноразового использования. Стерилизовано паром. Не используйте содержимое, если упаковка открыта или повреждена. Хранить в сухом месте (5–25 °C). Хранить в защищенном от света месте.

#### Описание

INTRASITE<sup>®</sup> Conformable состоит из нетканой повязки с прозрачным аморфным гидрогелем. Гидрогель содержит модифицированный полимер карбоксиметилового целлюлозы, пропиленгликоль и воду.

#### Механизм действия

INTRASITE Conformable способствует естественной санации раны путем аутолиза, за счет регидратации и увлажнения некротических тканей. Она также поглощает экссудат.

INTRASITE Conformable обеспечивает влажную среду для заживления ран. Она не повреждает жизнеспособные ткани и кожу вокруг раны. INTRASITE Conformable облегчает заживление полостных ран, позволяя им заживать от основания, а также помогает наносить гель в труднодоступные места.

#### Показания

INTRASITE Conformable назначается при открытых ранах, например, хирургических ранах с заживлением вторичным натяжением, злокачественных ранах, неглубоких ранах, нарушенном кожном покрове и радиационных ожогах.

#### Противопоказания

Не использовать, если существует известная чувствительность к INTRASITE Conformable или какому-либо из ее компонентов.

#### Меры предосторожности

Если появляются признаки раздражения или гиперчувствительности, прекратите использование. Используйте INTRASITE Conformable с осторожностью в области глаз. Не принимать внутрь. Не использовать на потрескавшихся сосках. Убедитесь, что все остатки геля удалены перед лучевой терапией. INTRASITE Conformable является продуктом для одноразового использования. В случае использования более чем для одного пациента может возникнуть перекрестное заражение или инфекция. При открытии упаковки нарушается стерильная защита, соответственно, неиспользованные повязки не должны сохраняться для будущего использования.

#### Инструкция по применению

Если продукт применяется на инфицированных ранах, инфекция должна лечиться в соответствии с местным клиническим протоколом. Для поверхностных ран используйте как минимум два слоя повязки. Убедитесь, что все остатки геля удалены перед лучевой терапией.

1. Очистите рану стерильным физиологическим раствором.
2. Наложите повязку, чтобы свободно заполнить или покрыть рану.
3. Закройте вторичной повязкой, например пленочной или абсорбирующей повязкой.
4. Чтобы сменить повязку, просто аккуратно снимите ее пинцетом и промойте рану стерильным физиологическим раствором. Убедитесь, что все перевязочные материалы удалены. Рекомендуется менять повязку как минимум раз в три дня.

#### Доступность продукта

Код	Размер	Доступность
66000324	10 см x 10 см / 7,5 г <sup>†</sup> гель	10 шт. в коробке
66000325	10 см x 20 см / 15 г <sup>†</sup> гель	10 шт. в коробке
66000326	10 см x 40 см / 30 г <sup>†</sup> гель	10 шт. в коробке

<sup>†</sup>Номинальная загрузка

#### Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road,  
Hull HU3 2BN, England  
\*Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew  
Дата выдачи 12/2014 www.smith-nephew.com  
55067

CE  
0086