

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	IV3000 IFU (Russian)
CODE:	
THIS BSC:	xxxxxxxx / 55849
PREV BSC:	
DATE:	03/02/2015
REVISION:	01

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1976		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	HB



## IV3000<sup>◇</sup>

### Влагонепроницаемая для фиксации катетера С полосками для фиксации и контрольной биркой

**СТЕРИЛЬНО** Для одноразового использования. Стерилизована окисью этилена. Не используйте, если упаковка открыта или повреждена. Хранить в сухом месте (<25 °C/77 °F). Беречь от солнечных лучей.

**Описание**  
IV3000 — это Влагонепроницаемая прозрачная пленочная повязка, специально предназначенная для фиксации катетера и защиты места внутривенного введения.

**Механизм действия**  
IV3000 изготовлена пленки REACTIC<sup>®</sup>, обладающей высокой воздухопроницаемостью и высокой проницаемостью для паров воды. Пленка защищает место внутривенного введения от загрязнений из внешней среды, обеспечивая физический барьер для жидкостей, твердых частиц и микробного загрязнения. IV3000 покрыта низкоаллергенным клеящим веществом. Повязка также снабжена стерильными фиксирующими полосками медицинского класса и контрольными бирками.

**Инструкция по применению**  
Очистите и тщательно высушите область наложения в соответствии со стандартными процедурами.

- Снимите фиксирующие полоски с печатной бумажной подложки (1) и наложите соответствующим образом, убедившись, что полоски не закрывают место введения. Полоски могут использоваться на крыльях или основании катетера для повышения безопасности, а также для закрепления трубок или стабилизации просветов катетера. Снимите подложку (1) с повязки.
- Снимите защитную бумагу (2) в направлении, указанном на схеме.
- Наложите повязку с катетером, плотно установленным в отверстие повязки.
- Приклейте часть повязки с клейкой пленкой на катетер, создавая минимум складок.
- Снимите прозрачную печатную подложку (3), подняв неклеящий язычок в конце повязки и потянув его диагонально до полного удаления подложки.
- Удалите оставшуюся бумажную защиту (4) и приклейте тканевые части повязки на крылья катетера.
- Расположите пленку вокруг катетера, чтобы завершить наложение повязки.
- В соответствии с местными клиническими протоколами информация может быть записана шариковой ручкой на

контрольной бирке перед снятием с подложки (1) и помещением в записи пациента, на кожу или на повязку (не закрывая обзор места установки катетера).

- При использовании более чем одной повязки не допускайте перекрывания повязок.
- Снимайте повязку, сняв тканевую часть повязки, а затем освободив пленку, растягивая ее параллельно коже пациента и одновременно удерживая кожу пациента и катетер другой рукой. Также можно использовать спирт, чтобы разрушить клеящий слой. В случае особенно чувствительной кожи для нарушения адгезии можно использовать теплую воду и мыло, а затем осторожно снять повязку.

**Показания**  
Вышеуказанный продукт подходит для фиксации катетеров с портом.

**Противопоказания**  
Повязка IV3000 должна использоваться только в местах внутривенного введения. Если требуется пленочная повязка для открытых ран, таких как пролежни, ожоги или донорские участки, следует использовать OPSITE<sup>®</sup> FLEXIGRID<sup>®</sup>. Фиксирующие полоски и контрольная бирка не предназначены для использования в качестве замены швов и других первичных методов закрытия ран.

**Меры предосторожности**  
Используйте только на подготовленной сухой коже. Не накладывайте повязки друг на друга и не допускайте перекрывания повязок. Периодически проверяйте место повязки и катетера, чтобы удостовериться, что фиксация является надежной и вливание происходит непрерывно и надлежащим образом, в особенности после принятия ванны или душа или намочения места повязки и катетера. Если повязка отсоединится, убедитесь, что катетер установлен правильно, а затем наложите новую повязку. Как и в случае других клеящихся изделий, накладывайте и снимайте осторожно, чтобы не допустить повреждения чувствительной или слабой кожи. В случае покраснения или повышения чувствительности прекратите использование.

IV3000 — это продукт для одноразового использования. В случае использования более чем для одного пациента может возникнуть перекрестное заражение или инфекция.

При открытии упаковки нарушается стерильная защита, соответственно, неиспользованные повязки не должны сохраняться для будущего использования.

#### Доступность продукта

Код	Размер	Показание	Доступность С	отверстием
4007	6 см x 7 см / 2 1/4 дюйма x 2 1/4 дюйма	Периферийные катетеры	Коробка 100 шт.	Нет
4008	10 см x 12 см / 4 дюйма x 4 1/4 дюйма	Центральные катетеры	Коробка 50 шт.	Нет
66004005	10 см x 12 см / 4 дюйма x 4 1/4 дюйма	Центральные катетеры	Коробка 10 шт.	Нет

#### Другие доступные продукты IV3000

Код	Размер	Показание	Доступность С	отверстием
66004011	5 см x 6 см / 2 дюйма x 2 1/2 дюйма	Периферийные катетеры	Коробка 100 шт.	Да
4006	7 см x 9 см / 2 3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма	Периферийные катетеры	Коробка 100 шт.	Да
66004009	9 см x 12 см / 3 1/2 дюйма x 4 1/4 дюйма	Периферийные и центральные катетеры	Коробка 50 шт.	Да
66800512	11 см x 14 см / 4 1/4 дюйма x 5 1/2 дюйма	Устанавливаемые периферийно центральные катетеры	Коробка 25 шт.	Да

#### Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN, England  
\*Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 02/2015  
www.smith-nephew.com

55849



0086