

# LANZO

## стерильные ланцеты

### 1. Назначение

Стерильные ланцеты общего назначения Lanzo предназначены для прокалывания кожных покровов с целью получения капли капиллярной крови.

### 2. Описание действия

Стерильные ланцеты общего назначения Lanzo используются для получения капли крови с помощью любых прокалывателей, которыми комплектуются глюкометры Gmate Life, например, для ручки Gmate или Lanzo. Так как стерильные ланцеты общего назначения Lanzo имеют особо тонкое острие (всего 28G), то проколы пальцев с их использованием происходят практически безболезненно. В связи с тем, что эти ланцеты имеют универсальное квадратное основание, их также можно применять и с другими автопрокалывателями (кроме автопрокалывателей серии Акку-Чек).

### 3. Характеристики

Сделаны из высококачественной хирургической стали, с трехгранной (копьевидной) заточкой Супертонкие – толщина иглы – всего 0,36 мм (28G). Уменьшение рубцов, улучшение процесса заживления. Уменьшение степени боли. Стерильно. Комплектация: 50 стерильных ланцетов в упаковке, инструкция.

### 4. Меры предосторожности

- Удостоверьтесь, что используете неповрежденный ланцет с защитным колпачком и утилизируйте использованный ланцет в соответствии с местными нормативными требованиями.
- Повторное использование, даже после спиртовой обработки ланцета не рекомендуется.
- Беречь от детей

### 5. Особые указания:

Производитель: GMMC со. Ltd.

Уполномоченный представитель в Российской Федерации: ООО «МедТехСервис»

г. Иркутск, ул. Свердлова, 36, оф. 546.

тел. +7 (3952) 48-67-19

Срок годности См. на упаковке.

Условия отпуска из аптек: без рецепта.

# LANZO

## стерильные ланцеты

