

| SMITH & NEPHEW RECORD |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| ITEM:                 | Leukoclip FD<br>IFU (Russian) |
| CODE:                 | N/A                           |
| THIS BSC:             | xxxxxxxx / 55851              |
| PREV BSC:             | N/A                           |
| DATE:                 | 10/04/2015                    |
| REVISION:             | 00                            |

| STRAWBERRY RECORD         |   |         |    |
|---------------------------|---|---------|----|
| JOB NO:                   | 2003  |         |    |
| DIMS:                     | 144 x 78.5mm  |         |    |
| COLOURS                   | <div style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> Black |         |    |
| Match to coated stock PMS |   |         |    |
| ARTWORK                   | MP  | CHECKED | HB |

RU

smith&nephew

# LEUKOCLIP<sup>◇</sup> FD

## Одноразовый кожный степлер

### СТЕРИЛЬНО EO

Стерилизовано оксидом этилена. Одноразовый. Хранить в сухом месте (25°C/77°F). Не использовать содержимое, если упаковка открыта или повреждена.

#### Показания

Одноразовый кожный степлер LEUKOCLIP FD предназначен для рутинного закрытия ран после операции.

#### Противопоказания

Не используйте, если невозможно достичь минимальной глубины 5 мм между скобками и сосудами, внутренними органами или костными выступами (напр., на черепе). Не используйте для пациентов с известной чувствительностью к никелю.

#### Меры предосторожности

При наличии большого объема подкожных жировых тканей для закрытия раны могут понадобиться дополнительные меры. Если скобка не закрывает рану надлежащим образом, удалите ее при помощи соответствующего устройства, например, LEUKOCLIP Staple Remover, и замените. Во время МРТ (магнитно-резонансной томографии) изображения могут быть скрыты или загорожены, а также может наблюдаться некоторое нагревание. Используйте кожный степлер

только для одного пациента, поскольку в противном случае может возникнуть перекрестное заражение, ведущее к инфекции.

#### Инструкция по применению

1. Подготовьте и очистите рану в соответствии с местным клиническим протоколом.
2. Извлеките степлер из упаковки, соблюдая правила асептики.
3. Для закрытия раны сведите края кожи вывернутым образом при помощи зубчатого пинцета или устройства для сведения тканей.
4. Осторожно поместите степлер на противоположные края кожи, требующие соединения.
5. Полностью нажмите на ручку. Теперь можно поднять степлер и повторить процесс. Переместитесь к следующей позиции сшивания на расстоянии приблизительно 1 см.
8. При необходимости накройте рану вторичной повязкой
9. Для удаления скобок используйте соответствующее устройство, например LEUKOCLIP Staple Remover. (66001201)

#### Размеры скобок



#### Доступность продукта

| Код      | Размер                  | Упаковка        |
|----------|-------------------------|-----------------|
| 66047110 | 35 Вт - 6,8 мм x 3,9 мм | 5 шт. в коробке |

#### Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, England. \*Торговый знак Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 04/2015 www.smith-nephew.com

CE  
0086

55851

| SMITH & NEPHEW RECORD |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| ITEM:                 | Leukoclip FD<br>IFU (Russian) |
| CODE:                 | N/A                           |
| THIS BSC:             | xxxxxxxx / 55851              |
| PREV BSC:             | N/A                           |
| DATE:                 | 10/04/2015                    |
| REVISION:             | 00                            |

| STRAWBERRY RECORD         |              |         |    |
|---------------------------|--------------|---------|----|
| JOB NO:                   | 2003         |         |    |
| DIMS:                     | 144 x 78.5mm |         |    |
| COLOURS                   | ■ Black      |         |    |
| Match to coated stock PMS |              |         |    |
| ARTWORK                   | MP           | CHECKED | HB |

RU

smith&nephew

# LEUKOCLIP<sup>◇</sup> FD

Одноразовый кожный степлер

