

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Melolin Cushioned Dressing Pads IFU (Russian)
CODE:	N/A
THIS BSC:	xxxxxxxx / 55850
PREV BSC:	N/A
DATE:	23/03/2015
REVISION:	00

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	2001		
DIMS:	297 x 70mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	HB

(RU)

smith&nephew

MELOLIN[®]

Перевязочные подушечки

СТЕРИЛЬНО ⚠ Для одноразового использования. Стерилизовано паром. Не используйте содержимое, если упаковка открыта или повреждена. Хранить в сухом месте (<25 °C).

Описание

Перевязочные подушечки MELOLIN – это подушечки с низкой адгезией и высокой абсорбцией, предназначенные для абсорбции лишней жидкости из раны.




Подушечки являются комфортными для пациента, позволяют коже дышать и имеют амортизирующее и защитное действие.

Показания

Подушечки MELOLIN предназначены для использования на порезах, ссадинах, легких ожогах и швах.

Инструкция по применению

1. Вымойте руки до и после обработки раны.
2. Осторожно очистите и высушите рану и окружающую кожу.
3. Извлеките повязку из упаковки.
4. Наложите подушечку MELOLIN на рану.
Глянцевая сторона пленки накладывается непосредственно на рану.
5. Зафиксируйте MELOLIN на месте хирургической лентой или бинтом для фиксации повязок.
6. Меняйте повязку ежедневно или чаще в зависимости от состояния раны.

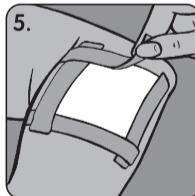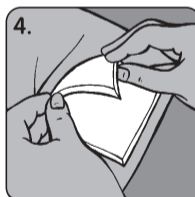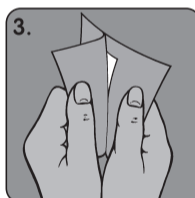

ПРИМЕЧАНИЕ.

Создавайте давление на кровоточащие раны.

Меры предосторожности при использовании

Немедленно обращайтесь к врачу в случае любых серьезных ран и ожогов, а также при возникновении покраснения или дискомфорта.

Доступность продукта

Доступные размеры подушечек MELOLIN:

- 5 x 5 см
- 10 x 10 см
- 20 x 10 см

Производитель
Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road,
Hull HU3 2BN, England. *Торговые знаки Smith & Nephew
©Smith & Nephew Дата выдачи 03/2015 www.smith-nephew.com

CE

55850

0086