

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Opsite Post-Op IFU (Russian)
CODE:	
THIS BSC:	xxxxxxxx / 54868
PREV BSC:	
DATE:	22/12/2014
REVISION:	04

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1903		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	HB

(RU)

smith&nephew

OPSITE[®] POST-OP

Водонепроницаемые повязки

СТЕРИЛЬНО  Для одноразового использования.

Стерилизовано окисью этилена. Не используйте, если упаковка открыта или повреждена. Хранить в сухом месте (<25 °C). Беречь от солнечных лучей.

Описание

Повязки OPSITE являются водонепроницаемыми, поэтому можно принимать душ. Пленка является непроницаемой для микроорганизмов, а впитывающая подушечка повязки является стерильной, чтобы снизить риск инфицирования. Повязка изготовлена из сверхтонкой воздухопроницаемой пленки, которая изгибается при движении.

Показания

Водонепроницаемые повязки OPSITE предназначены для использования при порезах, ссадинах и хирургических швах.

Меры предосторожности при использовании

Немедленно обращайтесь к врачу в случае любых серьезных ран и ожогов, а также при возникновении покраснения или дискомфорта. Как и в случае применения других адгезивных повязок, накладывайте и снимайте осторожно, чтобы не допустить повреждения чувствительной или слабой кожи.







Инструкция по применению

1. Вымойте руки до и после обработки раны.
2. Осторожно очистите и высушите рану и окружающую кожу.
Примечание. Остановите кровотечение (при необходимости используйте давление) и убедитесь, что кожа вокруг раны абсолютно сухая.
3. Извлеките повязку из упаковки.
4. Снимите верхний бумажный слой, обозначенный «1».
5. Наложите повязку с легким прижатием.
6. Снимите второй бумажный слой, обозначенный «1» и разгладьте повязку.
7. Снимите верхнюю оболочку, обозначенную «2».
8. Удаление: Чтобы снять повязку, поднимите один угол и медленно растяните пленку движением, параллельным коже.

Уход за повязкой

Эта повязка может быть оставлена на несколько дней, пока она защищает рану и хорошо держится. Смените повязку, если:

- она начинает протекать или больше не держится;
- она повреждена.

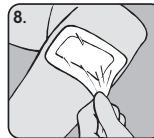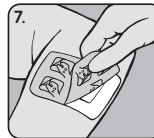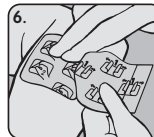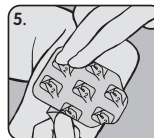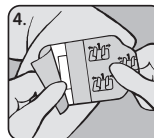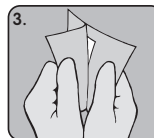

Доступность продукта

Доступен один размер водонепроницаемой повязки OPSITE: 6,5 см x 5 см.

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road,
Hull HU3 2BN, England
Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew
Дата выпуска 12/2014 www.smith-nephew.com

55068

CE
0086