

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Primapore Adhesive Dressings IFU (Russian)
CODE:	N/A
THIS BSC:	xxxxxxxx / 55865
PREV BSC:	N/A
DATE:	23/03/2015
REVISION:	00

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	2002		
DIMS:	297 x 70mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	HB

(RU)

smith&nephew

PRIMAPORE[◇]

Клейкие повязки

СТЕРИЛЬНО EO Для одноразового использования. Стерилизовано окисью этилена. Не используйте содержимое, если упаковка открыта или повреждена. Хранить в сухом месте (<25 °C).

Описание



Клейкие повязки PRIMAPORE состоят из абсорбирующей прокладки с низкой адгезией и мягкой клейкой каймой. Повязка остается на месте даже в неудобных местах.

Показания

Клейкие повязки Primapore предназначены для использования на порезах и ссадинах.


Инструкция по применению

1. Вымойте руки до и после обработки раны.
2. Осторожно очистите и высушите рану и окружающую кожу.
3. Извлеките повязку из упаковки.
4. Удалите верхнюю часть подложки.
5. Удалите вторую часть подложки и расправьте повязку, убедившись, что повязка полностью покрывает рану.
6. Меняйте повязку по необходимости (например, если она намочила или загрязнена).

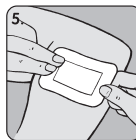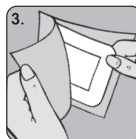

Удаление

7. Снимайте осторожно, в особенности при слабой коже или при использовании у пожилых пациентов. Придерживайте кожу свободной рукой, осторожно снимая повязку по росту волос.

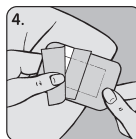

ПРИМЕЧАНИЕ.

Создавайте давление на кровоточащие раны.

Меры предосторожности при использовании

Немедленно обращайтесь к врачу в случае любых серьезных ран или ожогов, а также при возникновении покраснения или дискомфорта. Как и другие клеящиеся изделия, Primapore Adhesive следует накладывать и снимать осторожно.

Частая смена повязки, в особенности у пациентов со слабой кожей или дерматологическими заболеваниями, может привести к покраснению или повреждению кожи.

Доступность продукта

Клейкие повязки Primapore доступны следующих размеров:

- 7,2 x 5 см
- 8,3 x 6 см
- 10 x 8 см
- 15 x 8 см
- 10 x 20 см
- 10 x 25 см
- 10 x 30 см
- 10 x 35 см

Производитель
Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road,
Hull HU3 2BN, England. *Торговые знаки Smith & Nephew
©Smith & Nephew Дата выдачи 03/2015 www.smith-nephew.com

55865

CE

0086